

MLEZIVOMĚR

Mlezivoměr umožňuje měřit kvalitu mleziva, které je nezbytné pro zdravý vývoj telete po narození. Množství gamaglobulinů obsažených v mléce v první fázi po otelení určuje budoucí odolnost telete vůči nemocem. V případě nedostatku mleziva nebo malého obsahu gamaglobulinů je nutné zajistit teleti neprodleně náhradu.

Sestavení zařízení:

mlezivoměr se skládá ze skleněné pipety s šedou zátkou a sacím balonkem, měřidla umístěného v ochranném plastovém pouzdře a plastové hadičky.

- 1) Odstraňte černý balonek
- 2) Sejměte obě části plastového pouzdra z měřidla
- 3) Měřidlo opatrně vložte do pipety širším koncem k šedé zátce
- 4) Uzavřete pipetu černým balonkem
- 5) Plastovou hadičku upevněte do spodní zátky

Nyní je mlezivoměr připraven k použití.

Postup měření:

- 1) Ověřte, že se na mléce nenachází žádná pěna
- 2) Stlačte černý balonek a držte ho stisknutý
- 3) Ponořte pipetu plastovou hadičkou do mléka
- 4) Pomalu uvolněte balonek, aby se mléko nasálo do pipety
- 5) Počkejte, dokud se měřidlo nestabilizuje
- 6) Odečtěte hodnotu

Odečítání hodnoty:

Pokud mléko dosáhne zelené zóny: **výborné mléko**

Mléko obsahuje nad 100g gamaglobulinů na 1 litr mléka.

Pokud mléko dosáhne žluté zóny: **průměrné mléko**

Mléko obsahuje 50 – 100g gamaglobulinů na 1 litr mléka.

Pokud mléko dosáhne červené zóny: **špatné mléko**

Mléko obsahuje do 50g/1 litr a je nevhodné pro výživu telete.

